



Innovation überholt Tradition.



Flexy®-Löffel

Schluckbeschwerden? Der Flexy®-Löffel bietet eine geeignete Lösung zur Nahrungsaufnahme:

- erleichtert die Nahrungsdarreichung bei Schluckstörungen
- auch mit Zahnprothesen verwendbar
- generell wird bei der Nahrungsdarreichung weniger verkleckert
- keine Verletzungsgefahr (z. B. am Gaumen bei Spaltpatienten)
- das Löffelmaterial entspricht internationalen Normen (EEC, FDA)
- sterilisierbar im Autoklav mit Wasserdampf bis 135 °C
- spülmaschinenfest

FUNKTION des Flexy®-Löffel:

Die Zunge drückt den Löffel beim Schlucken an den Gaumen. Der nach oben offene (konkave) Löffel wird dabei umgestülpt und passt sich exakt dem Gaumen an. Seine Form wird durch die Gaumenwölbung konvex und der Nahrungsbrei wird dabei seitlich in die Mundhöhle gepresst. Die Zunge gelangt dadurch so nahe an den Gaumen, dass der Schluckreflex ausgelöst wird.

Art.-Nr.	Artikel	VE	€ / VE
FLMA-SH80-B	Flexy-Löffel maxi blau SH80, mittel	1 X 1	3,78
FLMA-SH90-DB	Flexy-Löffel maxi d.blau SH90, hart	1 X 1	3,78
FLMA-2K	Flexy-Löffel maxi 2K rot/blau SH70/SH90	1 X 1	4,80

Art.-Nr.	Artikel	VE	€ / VE
FLMA-SH80-R	Flexy-Löffel maxi rot, SH80, mittel	1 X 1	2,81
FLMI-SH80-R	Flexy-Löffel mini rot, SH80, mittel	1 X 1	2,55
FLMI-SH90-DB	Flexy-Löffel mini d.blau SH90, hart	1 X 1	1,87
FLMI-SH80-B	Flexy-Löffel mini blau, SH80, mittel	1 X 1	2,55